

Interpretatie Speed Duo FeLV-FIV

FeLV

- Een positief resultaat samen met (indicatieve) klinische symptomen van leukose maakt een infectie met FeLV zeer waarschijnlijk. **In 30% van de gevallen is de viremie voorbijgaand van aard. Daarom is het altijd verstandig om de test 12 weken later te herhalen.**
- Vaccinatie interfereert niet met de resultaten van de FeLV test.

FIV

- Een positief resultaat samen met (indicatieve) klinische symptomen maakt een infectie met FIV zeer waarschijnlijk.
- Bij kittens jonger dan 6 maanden leeftijd en afkomstig van een geïnfecteerde poes, kunnen persisterende colostrale antistoffen tot een positief resultaat leiden, zelfs als het kitten geen infectie heeft. De test moet in dat geval herhaald worden zodra het kitten ouder is dan 6 maanden.

FeLV en FIV

- In gebieden met een lage prevalentie en bij afwezigheid van (indicatieve) klinische symptomen, moet een positief testresultaat worden bevestigd door de test nogmaals uit te voeren. De voorspellende waarde van een negatief testresultaat is in deze gevallen uitstekend.
- **Een dier dat positief is voor FeLV en FIV heeft een grotere kans op het ontwikkelen van FIP. Serologisch testen op het feline coronavirus wordt daarom geadviseerd om dragerdieren op te sporen.⁶**

