

Interpretatie Speed FIV

- Een positief resultaat samen met (indicatieve) klinische symptomen maakt een infectie met FIV zeer waarschijnlijk. Wanneer er echter sprake is van een ernstige immunodepressie, waarneembaar tijdens het eindstadium van de klinische ziekte, kan het gehalte aan antilichamen onvoldoende zijn voor een positief resultaat.
- In gebieden met een lage ziekteprevalentie en bij afwezigheid van (indicatieve) klinische symptomen, moet een positief testresultaat worden bevestigd door de test nogmaals uit te voeren. De voorspellende waarde van een negatief testresultaat is in deze gevallen uitstekend.
- **Bij kittens jonger dan 6 maanden leeftijd en afkomstig van een geïnfecteerde poes, kunnen persisterende colostrale antistoffen tot een positief resultaat leiden, zelfs als het kitten niet geïnfecteerd is. De test moet in dat geval herhaald worden zodra het kitten ouder is dan 6 maanden.**
- **Een dier dat positief is voor FIV heeft een grotere kans op het ontwikkelen van FIP. Serologisch testen op het feline coronavirus wordt daarom geadviseerd om dragerdieren op te sporen.⁵**

