

Interpretatie Speed F-Corona

- Een positief resultaat identificeert katten die waarschijnlijk virus uitscheiden. Het duidt erop dat de kat eerder in contact is geweest met het feline coronavirus. Het betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de kat FIP heeft.
- **Katten die seropositief zijn voor coronavirus zouden moeten worden getest op retrovirussen, omdat gelijktijdige infecties met FIV of FeLV het risico op het ontwikkelen van klinische FIP verhogen.⁵**
- Wanneer er sprake is van ernstige ziekte of tijdens het eindstadium van de ziekte, kan de vorming van immuuncomplexen resulteren in een afname van de antilichaamconcentratie wat kan leiden tot een vals negatief testresultaat.

